


Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/feline-leukemia-virus-ag-felv-ag-test-1-test-p-430.html>

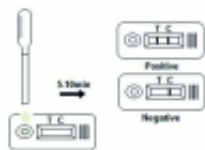

Feline Leukemia Virus Ag (FeLV Ag) Test - 1 test

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Numer katalogowy

N-81017

Opis produktu

Feline Leukemia Virus Ag Test (FeLV Ag)

Feline Leukemia Virus Ag Test is a sandwich lateral flow immunochromatographic assay for the qualitative detection of Feline Leukemia Virus antigen (FeLV Ag) in cat's whole blood, serum or plasma.

Assay Time: 10 - 15 min

Sample: Whole blood, serum or plasma



Test procedure:

1. Take cat's whole blood, serum or plasma as sample.
2. Take out the cassette from the foil pouch and place it horizontally.
3. Drip 1 drop of sample and immediately drip 2-3 drops of assay buffer into the sample hole.
4. Interpret the result in 10-15 minutes. Result after 15 minutes is considered as invalid.